
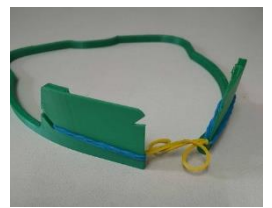


フェイスシールド・フルフェイス型装着例

(大阪大学大学院が公開しているデータを元に作成しています。)

- ①クリップを装着するところに 2 重にした輪ゴムを引掛けることで、取付けたフィルムがずれにくくなります。
- ②頭の小さい方や動きが多く FS がずれやすい場合は、輪ゴムを取付けることでタイトになります。(長さは調整して下さい)
- ③曇り抑制のための形状により、フレームが額に強くあたると感じる場合があります。布か何かをあてると良いと思います。

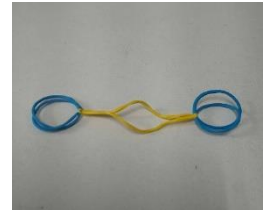

フェイスシールド・フロント型装着例

(神奈川大学が公開しているデータを元に作成しています。)

- ①クリアファイル下部の接合部をカットして、A3 大にする。
- ②専用紙を挟んで、クリアファイルの上から矢印の箇所に印を入れる。
- ③印を入れた所を中心にして、穴あけパンチで穴を開ける。
- ④折り目のところをカットすると、フロントシールドが2枚出来る。
- ⑤FS の突起部に穴をはめ込み、輪ゴムを使って装着する。



※工程が増えますが、フルフェイス型にも出来ます。

シールド部は、高透明度のクリアファイル、OHP シート、クリアポケット、クリアパック、塩化ビニール、ラミネートフィルム (画用紙でサンドイッチにして通す) 等を手に入る範囲で使っています。